


Manuel d'instructions Éthylomètre



Utilisation prévue:


Cet appareil doit être utilisé pour mesurer l'alcool présent dans l'haleine. Les mesures qu'il permet d'obtenir contribuent à détecter l'intoxication alcoolique.

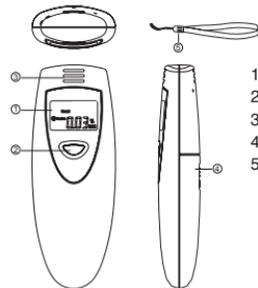

1. Écran LCD
2. Interrupteur
3. Ouverture du détecteur
4. Compartiment à batterie
5. Cordon de nylon

Avant l'utilisation:

Ouvrez le couvercle du compartiment à batteries derrière l'appareil. Insérez deux batteries alcalines AAA (non incluses) en suivant les positions de polarité indiquées. Remettez le couvercle du compartiment à batteries. L'appareil est prêt à être utilisé.

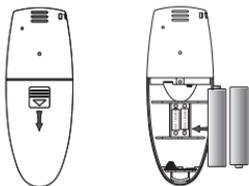

Trucs utiles:


1. ATTENDRE de 15 à 20 minutes après la dernière consommation d'alcool avant d'effectuer un test.
2. Lorsque les batteries sont faibles, la lettre « L » clignote sur l'écran LCD.
3. Veuillez consulter les précautions à prendre avant de remplacer l'appareil.

Utilisation de l'éthylomètre:

IMPORTANT: ATTENDRE de 15 à 20 minutes après avoir mangé, consommé de l'alcool ou fumé avant d'utiliser l'appareil. La présence d'aliments, d'alcool ou de fumée dans la bouche pourrait fausser les résultats à la hausse.

Mode Réchauffage:


1. Appuyez sur le bouton POWER pendant une seconde jusqu'à ce que le signal sonore retentisse.
2. « Warm up » s'affichera et un décompte de 10 à 00 commencera pour indiquer que l'appareil se réchauffe. Ne soufflez pas dans l'appareil pendant qu'il se réchauffe.

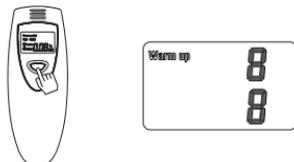

3. Le décompte pourrait recommencer au moins une fois ou passer de 05 à 00 si le détecteur n'est pas bien réchauffé. L'appareil pourrait rester en mode Réchauffage jusqu'à 25 secondes. ATTENDEZ de voir apparaître « BLOW » sur la gauche de l'écran avant de souffler.

Mode Test:

1. « Blow » s'affichera après le réchauffage. Un autre décompte de 10 à 00 commencera pour vous indiquer que l'appareil est en mode Test. Si vous ne soufflez pas dans le détecteur pendant le décompte, 6 autres secondes s'ajouteront au temps de test.

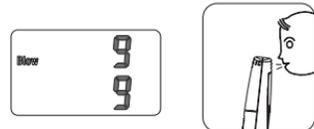

2. Prenez une grande respiration et soufflez dans le détecteur sur le dessus de l'appareil pendant 3 à 5 secondes sans vous arrêter. Les résultats s'afficheront après un décompte de 10 à 00. NE PAS TOUCHER le dessus de l'appareil avec les lèvres.
3. Observez l'écran LCD, et consultez le tableau ci-dessous pour obtenir la signification des codes qui s'afficheront sur l'écran LCD.
4. Remplacez l'appareil après une année. Consultez les Précautions.
5. Attendez au moins 3 minutes avant de faire un autre test.

Signification des codes qui s'afficheront sur l'écran LCD:

L'éthylomètre mesure le taux d'alcoolémie (affiché comme « BAC », Blood Alcohol Concentration).

L'alcoolémie est la quantité d'alcool présente dans le sang.

g/l exprime le rapport entre le poids (g) et le volume (l)

BAC de plus de 0,08%	DANGER : EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ AU SENS DE LA LOI
BAC entre 0,05% et 0,08%	ATTENTION: ÉTAT DE QUASI ÉBRIÉTÉ
BAC entre 0,02% et 0,05%	ALCOOLÉMIE FAIBLE à MODÉRÉE SUSCEPTIBLE DE DIMINUER LA CAPACITÉ DE CONDUIRE
BAC de moins de 0,02%	ALCOOLÉMIE FAIBLE

« Caution » apparaît si l'alcoolémie se situe entre 0,05% et 0,08% (BAC).

« Danger » apparaît accompagné d'un signal sonore si l'alcoolémie est de 0,08% ou plus (BAC).



ATTENTION: Toute consommation d'alcool peut réduire votre capacité de conduire. NE PRENEZ PAS LE VOLANT APRÈS AVOIR CONSOMMÉ DE L'ALCOOL!


Interruption automatique:

Les résultats du test peuvent rester à l'écran jusqu'à 15 secondes. Après 15 secondes, « OFF » apparaîtra à l'écran pour 2-3 secondes et l'appareil s'éteindra.



Installation du cordon de nylon:

Insérez la partie fine et noire du cordon de nylon dans la fente située au dos de l'appareil, dans le coin supérieur droit. Tirez la portion tressée grise au travers de la partie noire pour bien l'installer.

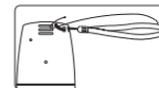

Précautions:

Nos essais ont démontré que cet appareil peut fournir des résultats pour au moins 400 tests. D'après des études menées par la NIAAA aux États-Unis, (www.alcoholism.about.com) cela correspond à l'utilisation d'une année pour la plupart des consommateurs d'alcool. VOUS DEVEZ REMPLACER CET APPAREIL APRÈS UNE ANNÉE D'UTILISATION À DÉFAUT DE QUOI LES RÉSULTATS POURRAIENT ÊTRE FAUSSÉS. Si vous consommez beaucoup d'alcool ou de tabac, il est conseillé de remplacer votre appareil plus rapidement.

Cet éthylomètre ne garantit pas l'exactitude à 100%, ni les mêmes résultats que les éthylomètres utilisés par les forces policières. Les résultats fournis par l'appareil ne le sont qu'à titre informatif et ne devraient pas être traités comme fiables. Les résultats peuvent changer selon les conditions environnantes, l'exposition directe au soleil, la chaleur excessive, l'immersion dans les liquides, la mauvaise utilisation, le temps écoulé depuis la dernière consommation d'alcool ou la quantité d'aliments, de médicaments et de drogues consommées. Il est fortement recommandé de ne jamais conduire aucun véhicule motorisé ni aucun équipement après avoir consommé de l'alcool, peu importe les résultats obtenus grâce à l'éthylomètre. L'éthylomètre indique les résultats sur un écran à LCD.

Détails techniques:

Méthode: Le produit utilise un capteur de gaz semi-conducteur pour détecter l'alcool dans l'haleine et calculer le taux d'alcoolémie.

Délai de préchauffage : 10-25 secondes

Durée d'accumulateur : Environ 200 tests avec batteries alcalines AAA

Durée de vie de l'appareil: Une année, environ 400 tests

Température d'utilisation: 10 à 40°C

Température d'entreposage : 0 à 50°C

Des questions? Appelez-nous sans frais : 800-261-1193